

FROGGY MOUTH


Popraw funkcję przełykania
i pozycję języka
już w 15 minut dziennie

INSTRUKCJA DLA MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH PACJENTÓW



Został Ci zalecony aparat FroggyMouth

FroggyMouth koryguje nieprawidłową funkcję przełykania. Poprzez tworzenie nowego, poprawnego nawyku - podczas przełykania zęby delikatnie się stykają, a język naciska na podniebienie.

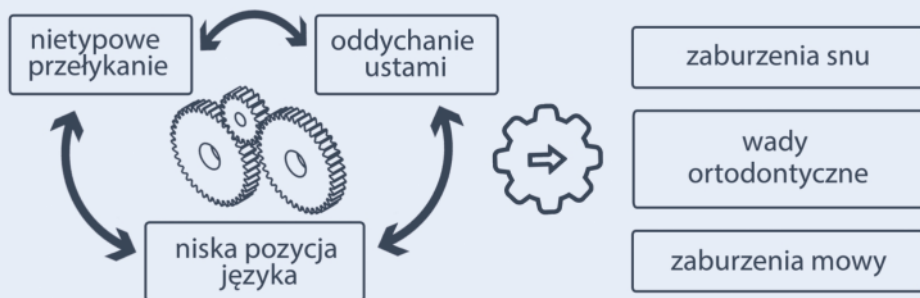

Wszystkie te schorzenia kliniczne mają jedną wspólną cechę: każde z nich w różny sposób związane jest z nieprawidłową pozycją języka.

Obecnie na świecie aż 1/3 dorosłej populacji nadal cierpi na wymienione dysfunkcje.

Korygując dysfunkcję przełykania FroggyMouth pomaga:

-  Skrócić **czas trwania leczenia**,
-  Poprawić **jakość wyników**,
-  Zmniejszyć **ryzyko nawrotu**.

FroggyMouth jest kompatybilny ze wszystkimi innymi aparatami ortodontycznymi (wyjmowanymi, aparatem stałym czy alignerami).

Jak działa FroggyMouth?

FroggyMouth powinno być noszone przez 15 minut każdego dnia, najlepiej podczas oglądania telewizji. W czasie noszenia aparatu, niepoprawny nawyk przełykania zmienia się automatycznie, nie zakłócając tym samym jakości snu.

Prosimy o dokładne przestrzeganie **zasad używania FroggyMouth:**



Zakładaj FroggyMouth raz lub dwa razy dziennie przez 15 minut, aby szybko i skutecznie rozwinąć nowy sposób przełykania. **Regularność jest kluczowa!**



Noś FroggyMouth przy podniesionym ekranie telewizora lub komputera/laptopa. Unikaj pochylonej postawy głowy!



Uwaga pacjenta powinna być skoncentrowana na ekranie, aby nowy sposób przełykania stał się automatyczny i naturalny.

Jak nosić FroggyMouth?



3 kluczowe rzeczy do zapamiętania



Całkowicie normalne jest odczuwanie zwiększonego wydzielania śliny podczas noszenia aparatu - szczególnie w pierwszych dniach użytkowania. Jeśli trwa to dłużej niż 10 dni, poinformuj swojego specjalistę.



Obserwuj kilka razy dziennie i zgłoś swojemu specjaliście na następnej wizycie:

-  Pozycję języka w stanie spoczynku,
-  Relaksację szyi i ramion,
-  Poprawę w jakości snu.



Konieczne jest noszenie FroggyMouth **KAŻDEGO** dnia. W przypadku, gdy usuniesz z ust aparat w trakcie 15-minutowej terapii, **musisz zacząć użytkowanie od nowa.**

Czyszczenie aparatu



FroggyMouth należy czyścić szczoteczką i pastą do zębów lub płynem do płukania ust bez zawartości alkoholu. Po osuszeniu aparatu przechowywać w dedykowanym pojemniku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania aparatu odwiedź:



[www.polorto.com.pl/dla pacjenta](http://www.polorto.com.pl/dla_pacjenta)

Prosimy o przestrzeganie zaleceń Twojego specjalisty!

FroggyMouth to urządzenie medyczne wyprodukowane w 100% we Francji. Nie zawiera lateksu ani ftalanów, jest certyfikowane przez CE i FDA. Wszystkie nasze aparaty pakowane są w WISE (Work Integration Social Enterprise).

